

ピネル製ピンお取扱いについて

【これまでお取扱いしてきたピンと現在ピンの比較】

※材質は違いますが、形状は全て同一ですので、ピネル製抑制帯に問題なくお使い頂けます。

材質と構造	ステンレスと真ちゅうの分離構造型	真ちゅうの一体型	ステンレスの一体型
写真			
販売時期	発売当初～ 2015年5月まで	2015年5月～2019年12月頃まで	2019年10月～現在
見分け方	軸の下部につなぎ目があります	軸につなぎ目がなく、 <u>光沢のある金属色</u>	軸につなぎ目がなく、 <u>光沢のない金属色</u>
耐用年数	使用開始よりおおむね5年	使用開始よりおおむね5年	永久使用可能 (耐用年数なし)
特徴	軸部分はステンレス製のため、軸の摩耗が少ない。 塩素消毒により軸のつなぎ目の接着剤が剥がれる危険がある。	つなぎ目がないため、土台と軸の分離の心配がない。 塩素消毒に弱い(サビなど変質の可能性)	つなぎ目がないため、土台と軸の分離の心配がない。 塩素消毒にも強い。



ご注意

- ・消毒される場合、「分離構造型」および「真ちゅう一体型」には、塩素系製剤は使用できません。アルコール製剤をお使いください。
- ・「分離構造型」および「真ちゅう一体型」ピンの耐用年数は、使用頻度にもよりますが、おおむね5年となります。
- ・「ステンレス一体型」は永久使用可能としておりますが、昇降式ベッドへの挟み込みによる破損など、不適切なご使用による破損については、当社にて補償致しかねる場合がございます。
- ・耐用年数を経過する前でも、軸の破損や先端の摩耗など、開閉に不具合が生じた場合は、速やかにご使用を中止してください。

輸入販売元



株式会社ピネルジャパン
PINEL JAPAN Inc.

TEL:045-444-9115
<https://pinel-japan.jp/>