

ピネルメディカル社製 緩和抑制帯の点検について

このたび、緩和抑制帯の修理対応が終了しましたことで、お客様にはご不便をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。

つきましては、お客様にて点検やお買換えのご判断をされる際に目安となる項目をご案内させていただきますので、お役立て頂ければ幸いです。

なお、ご購入から半年以内の初期不良品につきましては、新品と交換させていただきますので、お手数ですが弊社までご連絡ください。

製品分類	点検内容	推奨対応内容
布類全般（各ベルト、キャリングバッグ）	耐用年数（使用からおおむね5年）を経過していませんか？	超過している場合は買換え
	表地の破れはありませんか？	内側の素材が露出していたり広範囲の場合は買換え
	縁バイアステープの破損や縫い目のほつれはありませんか？	
	ループやバックル、ショルダーベルトなどを縫い合わせている部分の縫い目のほつれや芯地の露出はありませんか？	ループやバックルなどのつなが目が部分的にでも浮いてきている状態の場合は買換え
	ベルト本体の縮みや厚みが薄くなってへたっていませんか？	購入時と比べて明らかに異なる場合は買換え
	鳩目（丸い金属リング）の変形はありませんか？	変形の度合いが大きい場合は、他の位置の鳩目を使用または買換え
	鳩目（丸い金属リング）の脱落はありませんか？	①複数個の鳩目が脱落②脱落部周囲の生地は裂け目が大きい③常に留め付ける位置の鳩目が脱落 いずれか一つでも当てはまれば買換え
手部／脚部用ベルトのマジックテープ部	手首にマジックテープバンドを貼り合わせた状態で強く引っ張るとテープがずれたり、外れませんか？	まず、黒い面の糸くずなどのゴミを取り除く。それでも接着力が回復しない場合は買換え
	マジックテープバンド内側の縫い目やマジックテープの縫いつけ部分について、縫い目のほつれや芯地の露出はありませんか？	強い負荷がかかる部分のため買換え

ボタン	耐用年数（使用からおおむね2年）を超過していませんか？	超過している場合は買換え
	ロックしたピンから外れにくい、逆にすぐ外れてしまうなどの異常はありませんか？	速やかに使用中止し、買換え
	使用まもないのに、ボタンの下蓋と上蓋が外れてしまうようなことはありますか？	初期不良品の可能性があるため、当社までご連絡ください
	ひも通しの突起が欠けていませんか？	ボタン単体としての継続使用は可能ですが、欠けた断面が尖っている場合は速やかに使用中止し、買換え
ピン （分離型または真鍮型）	耐用年数（使用からおおむね5年）を超過していませんか？	超過している場合は買換え
ピン （全てのタイプ共通）	ロックしたボタンから外れにくい、逆にすぐ外れてしまうなどの異常はありませんか？	他のボタンとの組み合わせでも異常がある場合は速やかに使用中止し、買換え
	軸が変形しているなどの形状異常はありませんか？	速やかに使用中止し、買換え
マグネットキー	プラスチックパーツが破損していませんか？	破損が大きい場合は買換え